

Hautschutzplan

Hautgefährdung durch:	 Hautschutz	 Hautreinigung	 Hautpflege	 Hände-desinfektion	 Handschuhe
	• vor Arbeitsbeginn • nach Pausen • zwischendurch	• vor Pausen • nach der Arbeit • nach sichtbarer Verschmutzung	• nach Arbeitsende • nach Hautreinigung • bei Bedarf, bzw. morgens und abends	• vor und nach jeder Behandlung • nach Kontakt mit verletzten Hautarealen • nach jedem Toilettenbesuch	Unsterile Einmalhandschuhe z.B. bei • Kontakt mit Blut Haushaltshandschuhe z.B. • beim Umgang mit Lösungen • bei Reinigungsarbeiten
Wassermischbare Arbeitsstoffe, z.B. • Desinfektionsmittel • Reinigungsmittel	Prodene Pro 2 ggf. Handschuhe	Prodene Lunea	Prodene Promains		
Nichtwassermischbare Arbeitsstoffe, z.B. • Massageöle • Lösemittel	Prodene Pro1 ggf. Handschuhe	Prodene Lunea	Prodene Promains		
Feuchtigkeitsstau und Mazeration, z.B. • beim Tragen von Handschuhen	Prodene Promains	Prodene Lunea	Prodene Promains		
				Prodene Septigel	

Desinfektionsplan

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 Hygienische Händedesinfektion	• vor Arbeitsbeginn; • nach Ablegen der Handschuhe • vor/nach jeder Behandlung • vor Umgang mit Nahrungsmitteln • bei Arbeitsende	Die Händedesinfektion ist die einfachste, sicherste und billigste Methode zur Verhütung von Kreuzinfektionen. Konzentrat 30 Sek. lang in die trockenen Hände einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden.	Prodene Septigel 3 ml 30 sek.	Podologe
 Händewaschung	• nach Verschmutzung; • nach Toilettenbesuch; • vor Pausen, • bei Bedarf	Flüssigseife aus Wandspender auf die befeuchteten Hände geben. Nach dem Waschen Hände gründlich abspülen. Mit Einmal-Handtüchern abtrocknen.	Prodene Lunea	Podologe
 Haut- und Händepflege	• mehrmals täglich; • bei Bedarf	In die Haut einmassieren.	Prodene Promains	Podologe
 Hautdesinfektion	• vor Verletzungen der Haut z.B. Piercing, Tätowierung, Permanenet Make-up	Präparat aufsprühen, mit sterilem Tupfer abreiben, nochmals aufsprühen, Einwirkzeit einhalten (Haut trocknen lassen).		Podologe
	;		<u>Einwirkzeit:</u> talgdrüsenarme Haut: 1 Minute talgdrüsenreiche Haut: 10 Minuten	

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 Instrumente Pinzetten, Scheren etc.	• sofort nach Gebrauch		Prodene D51	Podologe
 Oberflächen von Geräten	• täglich; • behandlungsnahen Flächen nach jedem Gebrauch	Desinfizierend abwischen. Dabei darf keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen. Vorsicht bei stromführenden Teilen. Netzstecker ziehen. Herstellerangaben beachten.	Prodene D51 5 min.	Podologe
 Inventar ▪ Behandlungsliegen ▪ Behandlungssessel ▪ Arbeitsflächen	• mindestens 1 x täglich • behandlungsnahen Flächen nach jedem Gebrauch	Desinfizierend abwischen bzw. auswischen.	Prodene Aseptil 5 min. Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Podologe
Waschschüsseln, Aufbewahrungsbehälter für Instrumente	• 1 x wöchentlich und bei Bedarf • Waschschüsseln nach jeder Behandlung	Desinfizierend abwischen. Flächen nicht trocken reiben.	Prodene Aseptil 5 min.	Podologe
 ▪ Sanitärbereich  ▪ Toiletten	• 1 x täglich • zwingend nach jedem Gebrauch • 1-2 x täglich	• Desinfizierend abwischen. Kalkablagerungen an den Armaturen mit Essigreiniger entfernen. • Brille, Deckel und Armatur – Feucht-Wisch-Methode. Desinfizierende Reinigung des Toilettenbeckens und der Bürstenschale.	Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Reinigungspersonal

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 Abfallbehälter	1 x täglich	Abfallbehälter leeren. Desinfizierend abwischen. Neue Abfalltüte einlegen	Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Reinigungspersonal
 Reinigungsutensilien Aufbereitung	zwingend nach jedem Gebrauch	Mops/Lappen nach Gebrauch der Aufbereitung in der Waschmaschine zuführen. Waschprogramm: > 60°C bzw. 95°C.		Reinigungspersonal
 Fußböden	1 x täglich	Feucht-Wisch-Methode	Prodene Nocosomia surf 0,25 % 15 min.	Reinigungspersonal